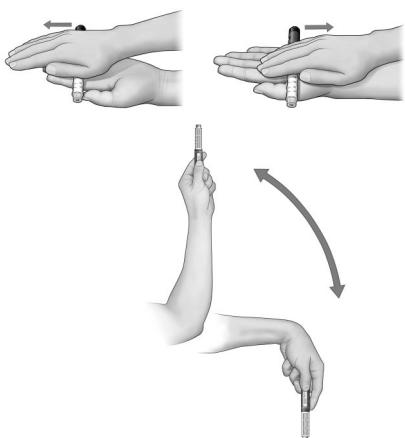
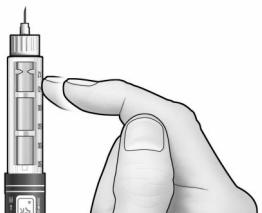
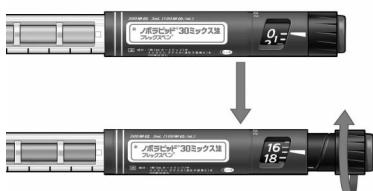
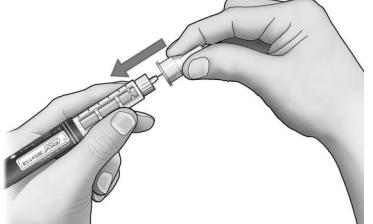


# フレックスペン<sup>®</sup>自己注射チェックリスト

チェック項目	/	/	/
<b>インスリン製剤について</b>			
インスリン製剤の名前 インスリン製剤の名前 	<p>◇あなたが使うインスリン製剤の名前を知っていますか</p> <p>◇自分のフレックスペン<sup>®</sup>の色(製剤カラー)を知っていますか</p> <p>◇自分が指示された単位数を知っていますか</p>		
<b>注射の準備</b>			
	<p>ノボラピッド<sup>®</sup>30ミックス ノボラピッド<sup>®</sup>50ミックス ノボラピッド<sup>®</sup>70ミックス ) の場合</p> <p>◇手のひらにはさんで往復10回以上水平に転がしましたか</p> <p>◇懸濁製剤は白く濁るまで往復10回以上上下に振りましたか</p> <p>◇ゴム栓を消毒綿で拭きましたか</p> <p>◇注射針をフレックスペン<sup>®</sup>に正しく取りつけましたか</p>		
<b>空打ち</b>			
	<p>◇ダイアル表示を「2」に設定しましたか</p> <p>◇3~4回はじいて空気を上に集めましたか</p> <p>◇インスリンが出ることを確認しましたか</p> <p>◇空打ちは毎回実施していますか</p>		
<b>単位の設定</b>			
	<p>◇ダイアル表示が「0」になっていることを確認しましたか</p> <p>◇単位合わせダイアルを回して、注入単位数を正しく設定しましたか</p> <p>◇単位合わせダイアルを回しすぎた時の対処法を知っていますか</p> <p>◇残量以上単位合わせダイアルが回らないことを知っていますか</p>		

チェック項目		/	/	/
<b>注射のしかた</b>	<p>◇注射前に空打ちをしましたか</p> <hr/> <p>◇注射部位を消毒しましたか</p> <hr/> <p>◇注入ボタンを最後まで押し、そのまま6秒以上数えましたか</p> <hr/> <p>◇注射後、注入ボタンを押したまま針を抜きましたか</p>			
				
<b>注射が終わったら</b>	<p>◇注射後すぐに針ケースをかぶせて、注射針をはずしましたか</p> <hr/> <p>◇注射針は正しくはずしましたか</p> <hr/> <p>◇使用済みの注射針は主治医の指示に従って、正しく捨てていますか</p> <hr/> <p>◇フレックスペン®にキャップをつけましたか</p>			
				
<b>その他</b>	<p>◇注射針は毎回、新しいものを使っていますか</p> <hr/> <p>◇使用中のフレックスペン®は室温で保管していますか</p> <hr/> <p>◇未使用のフレックスペン®を冷蔵庫に入れていますか</p> <hr/> <p>◇インスリンは凍らせてはいけないことを知っていますか</p>			

### ノボケア相談室

フレックスペン®に関する疑問・質問などは、お気軽に下記のノボケア相談室にお問い合わせください。



**月曜日から金曜日**  
(祝日・会社休日を除く)

**9時～18時**

**0120-180363**



**夜間及び土日・祝日・会社休日**  
(時間外受付センター)

(注)緊急でないお問い合わせの場合には、原則として、翌営業日に回答させていただきます。

**0120-359516**