




ミリオくと覚える


# ミリオペン®の使い方 ナビ

## キャップの取外し

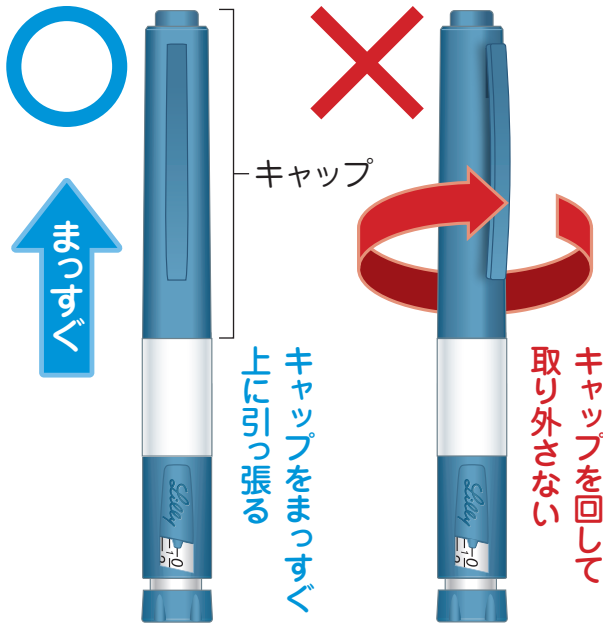

## キャップの取付け

クリップと単位表示窓の向きに注意!

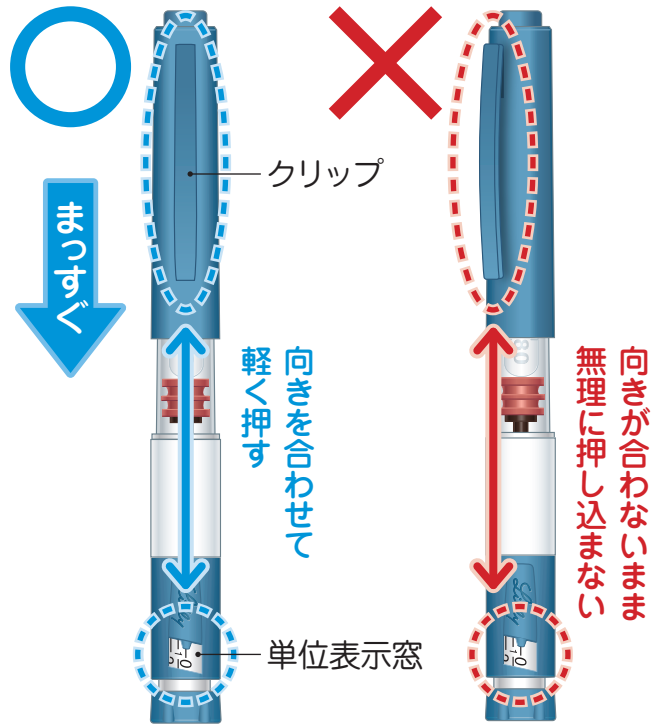

※上の図は取付けの一例です。キャップとペン本体の四角い側面が合うように取り付けてください。

ミリオペン®は握りやすく、また転がりにくいように、四角い形状をしています。このためキャップを回して取り外したり、向きを合わせずに取り付けたりすると、キャップがこわれたり外れなくなるおそれがあります。



もし、キャップが外れなくなったら、キャップとペン本体を少し回して、四角い側面が合うように戻してください。

\* ミリオペン®には「ヒューマログ®注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス25注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス50注ミリオペン®」「ヒューマログ®N注ミリオペン®」がございます。

## Lilly Answers

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ  
(一般の方・患者様向け)  
0120-245-970 ※1 078-242-3499 ※3

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※2 祝祭日及び当社休日を除きます。また、年末年始の休日を除きます。 ※3 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。

### 〈当社製品に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30 ※2

### 〈当社注入器に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00 ※2

● 上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています