




ミリオくと覚える

ミリオペン®の使い方 ナビ


インスリンの投与量を設定する際は、必ず「単位表示窓」の内側の目盛り(単位表示数)を確認してから投与してください。

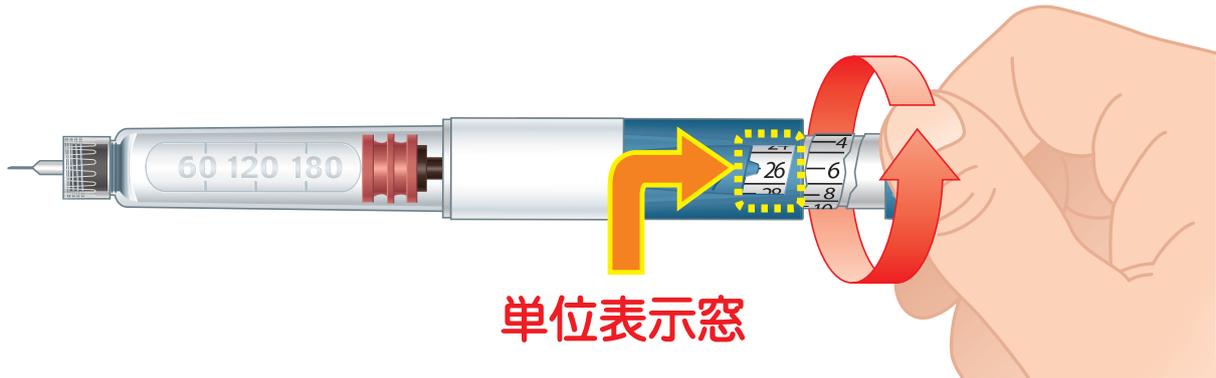

単位表示窓

単位表示窓の外側の数字は設定単位数ではありません。

例) 6単位を設定する際に、誤って図のように単位表示窓外側の数字で設定すると、実際には26単位が設定されてしまいます。ご注意ください。

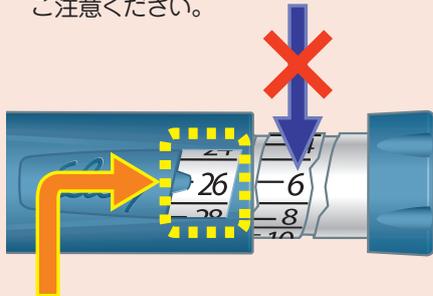

○ 単位表示窓の内側に表示された単位表示数が設定量となります。

ミリオペン®では、20単位以上を設定する際、単位表示窓の外側のダイヤル部に目盛りが現れますが、**この外側の数字は設定単位数ではありません。**必ず、単位表示窓内の単位表示に示された数字を確認して投与を行ってください。



ミリオペン®のご使用に際して、ご質問やご不明な点がある場合は、主治医にご相談いただくか、弊社までお問合せください。

* ミリオペン®には「ヒューマログ®注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス25注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス50注ミリオペン®」「ヒューマログ®N注ミリオペン®」がございます。

Lilly Answers

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ

(一般の方・患者様向け)

0120-245-970※1 078-242-3499※2

※1 通話料は無料です。携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 ※2 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。 尚、通話料はお客様負担となります。
※3 祝祭日及び当社休日を除きます。 ※4 年末年始の当社休日を除きます。

〈当社製品に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30※3

〈当社注入器に関するお問合せ〉

● 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00※4

● 上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています