



ミリオくと覚える

# ミリオペン®の使い方 ナビ

単位設定ダイヤルが  
こんなときは？



回しにくい




押し切れない




新しい注射針を取り付けて空打ちし、インスリンが流れ出ることを確認してください。

新しい注射針に交換

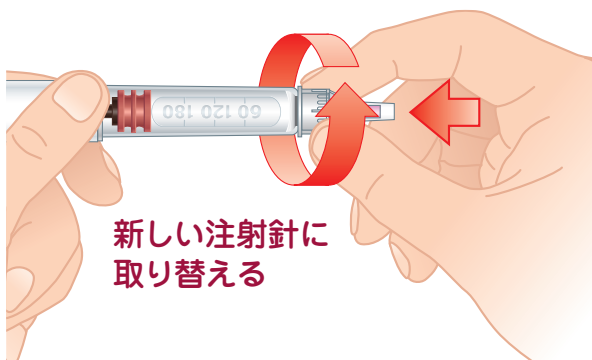

新しい注射針に  
取り替える

空打ち

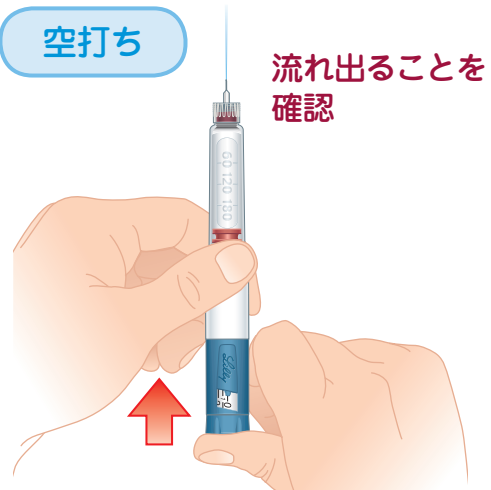

流れ出ることを  
確認



次のようなとき、単位設定ダイヤルを回しにくくなったり、押し切る時に重く感じることがあります。

- ① 取り付けた注射針が曲がっている、または詰まっている。
- ② 注射針を取り付けずに単位設定ダイヤルを回して、押ししてしまった。

※ただし、ミリオペン®はインスリン残量を超えて単位設定ダイヤルが回らないように設計されています。

新しい注射針に交換しても注入が重く感じられる場合は、  
新しいミリオペン®に交換してください。

\* ミリオペン®には「ヒューマログ®注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス25注ミリオペン®」「ヒューマログ®ミックス50注ミリオペン®」「ヒューマログ®N注ミリオペン®」がございます。

## Lilly Answers

日本イーライリリー医薬情報問合せ窓口 リリーアンサーズ

(一般の方・患者様向け)

0120-245-970 ※1 078-242-3499 ※3

※1 通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。 ※3 フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。  
※2 祝祭日及び当社休日を除きます。 ※4 年末年始の休日を除きます。

〈当社製品に関するお問合せ〉

- 受付時間 月曜日～金曜日 8:45～17:30※2

〈当社注入器に関するお問合せ〉

- 受付時間 月曜日～土曜日 8:45～22:00※4
- 上記時間外は音声ガイダンスにて対応しています

INS-P291 (RO)  
2009.02