


インスリン自己注射のポイント 5

.....
**注射の前には必ず
空打ちをしましょう**

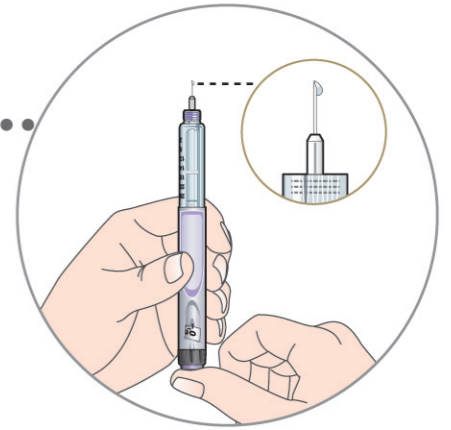

監修：萬田記念病院 薬局長 中野玲子先生

サノフィ・アベンティス 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート

オペチコール24
0120-49-7010
ヨクナレ糖



サノフィ・アベンティス株式会社

sanofi aventis
Because health matters

2011年2月作成


製造販売：サノフィ・アベンティス株式会社
〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

注射の前には必ず空打ちをしましょう


なぜ？ 空打ちが必要な理由は・・・

- カートリッジ内や注射針内にある大きな気泡をとり除くため
- 注射針や注入器が正しく使えるかどうか確認するため

解決法 正しい空打ちの方法は・・・

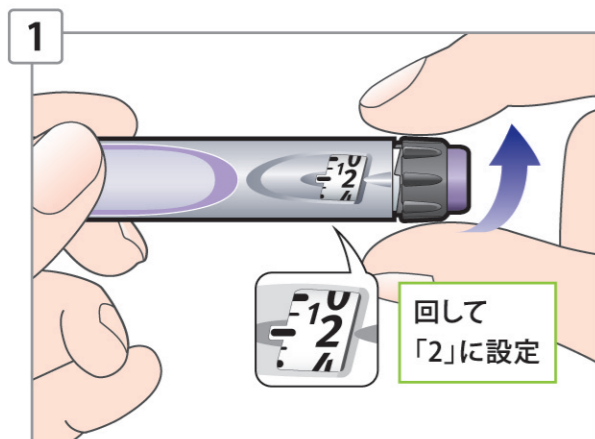


注射針を取りつけた後
単位設定ダイヤルを回し、
「2」単位に設定する

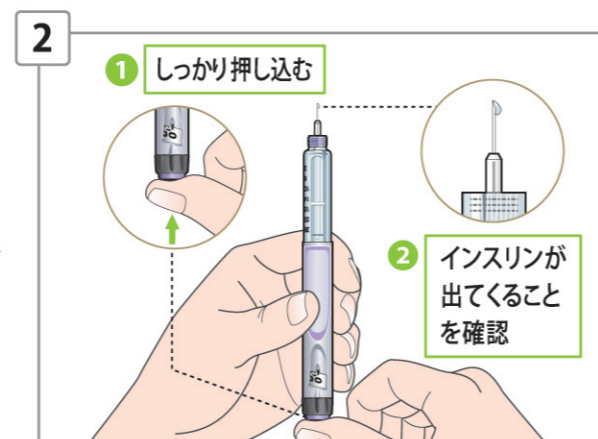


注入ボタンをしっかり押し込み、
針先からインスリンが出てくる
ことを確認する

ポイント 空打ちで重要なポイント

- 毎回注射の前に行う
- インスリンが出てくることを確認する
- インスリンが針先から出ない場合、数回空打ちを繰り返し行う

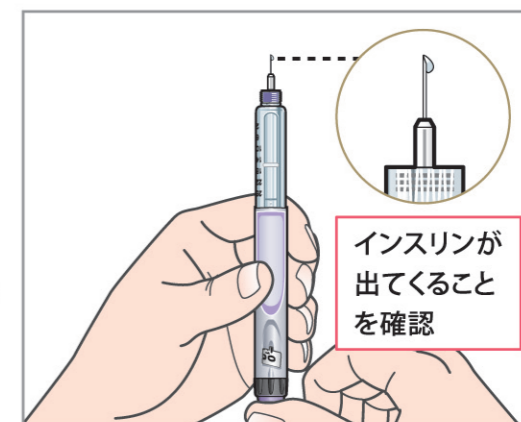

- インスリンの出方が違って見えても問題はない

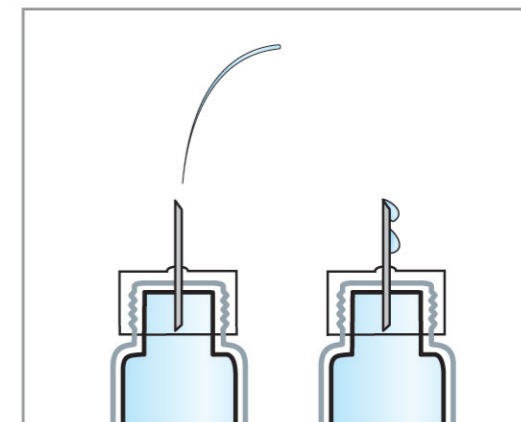

- 空打ちでとり除けない小さな気泡は残っていても問題はない

