


インスリン自己注射のポイント 7

**注入ボタンは、
真上から押して
10秒数えてから
注射針を抜きましょう**

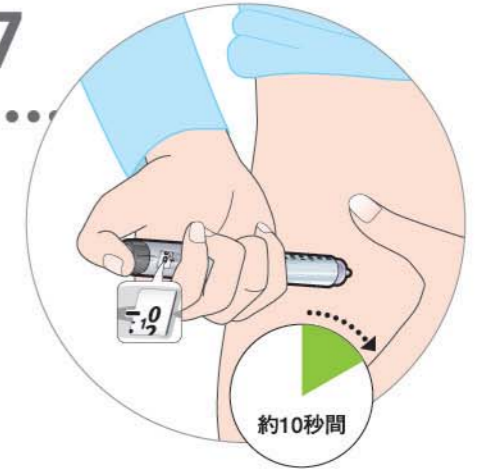

監修：萬田記念病院 薬局長 中野玲子先生



サノフィ・アベンティス株式会社

sanofi aventis
Because health matters

2010年5月作成

サノフィ・アベンティス 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル

操作方法を24時間365日サポート


オペチャコール24

0120-49-7010
ヨクナレ糖

注入ボタンは、真上から押して10秒数えてから注射針を抜きましょう


なぜ？ 注入ボタンを真上から押さないといふ理由

- 注入ボタンが押しにくくなる

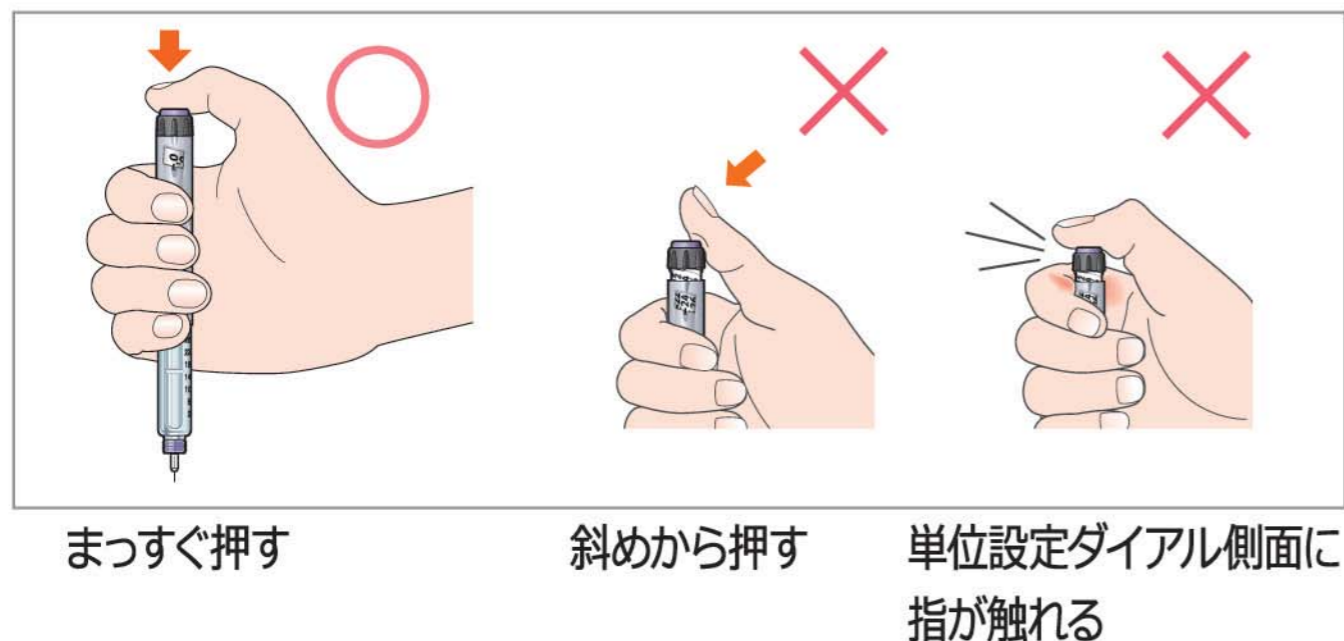


なぜ？ 10秒数えてから注射針を抜く理由は...

- インスリンを完全に注射するため

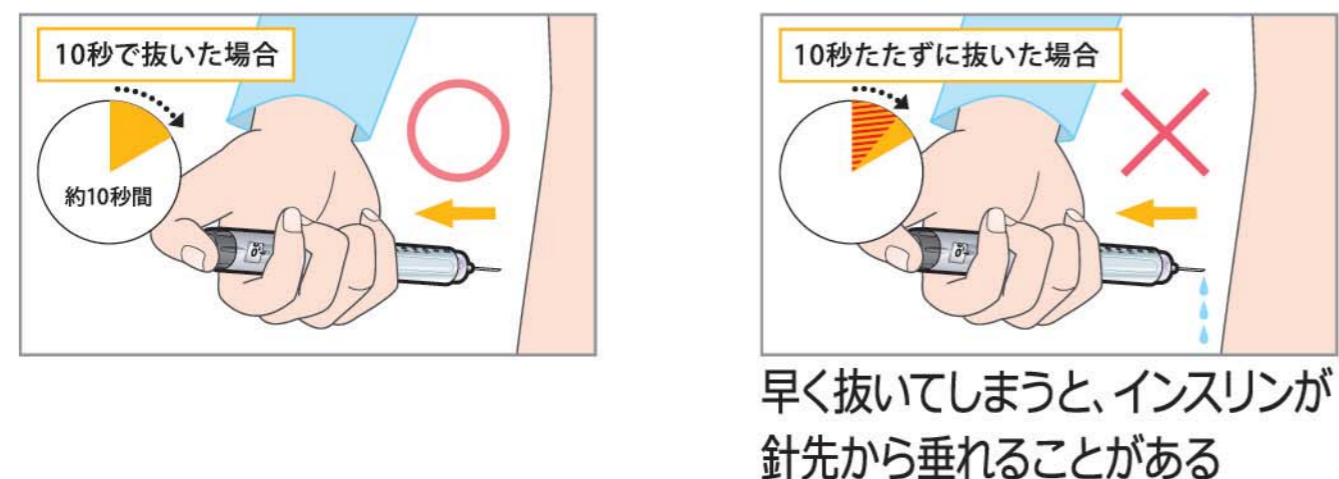

解決法 正しい注射の方法は...

- 注入ボタンを真上からダイヤル表示が「0」になるまで押し込み、そのまま押した状態で10秒数える
- 注入ボタンを押したまま注射針を抜く

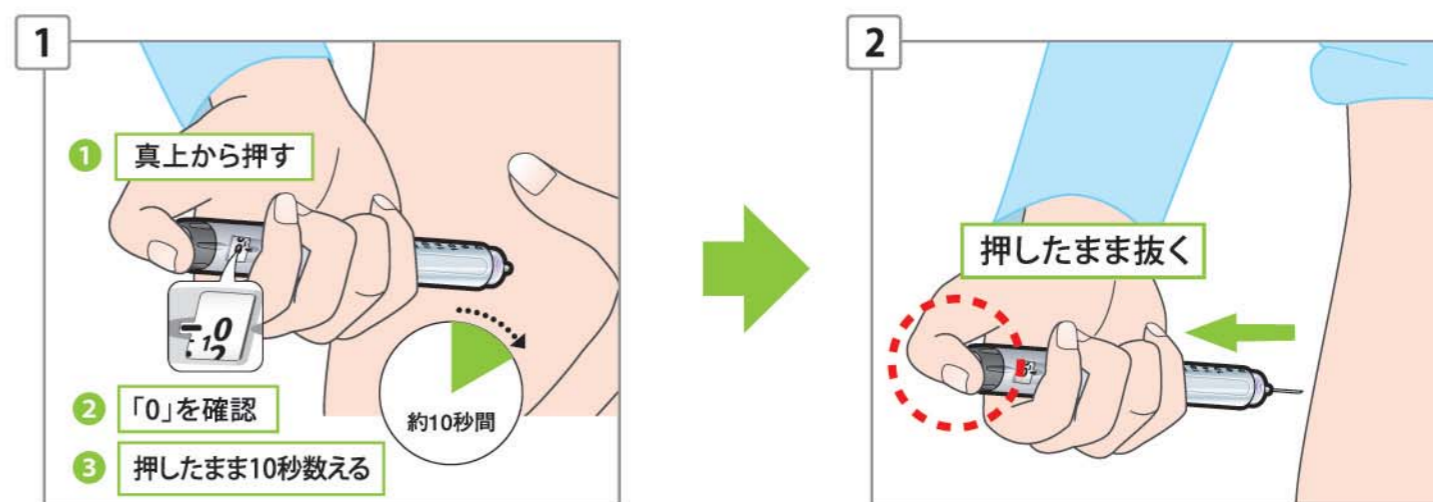

ポイント 注射針を抜いた後に、インスリンが針先から出てきてもわずか（液滴が針先につく程度）であれば、問題ありません

- 決して再度単位設定をして注射しない
- 針先から出るインスリンの量が多くて不安な場合には主治医に相談する