


インスリン自己注射のポイント 9

注射が終わったら、  
すぐに注射針を  
はずして保管しましょう

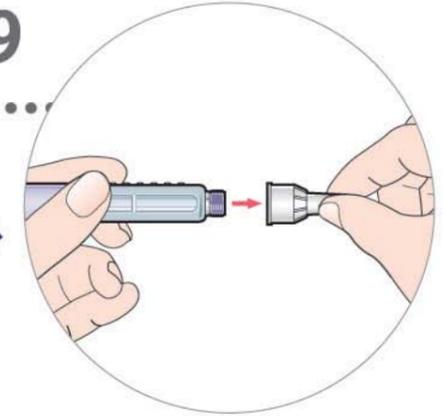

監修：萬田記念病院 薬局長 中野玲子先生



サノフィ・アベンティス株式会社

sanofi aventis  
Because health matters

2010年4月作成

サノフィ・アベンティス 糖尿病関連医療機器サポートダイヤル


操作方を24時間365日サポート

オペチャコール24  
0120-49-7010  
ヨクナレ糖

# 注射が終わったら、すぐに注射針をはずして保管しましょう

## なぜ？ 注射針をつけたまま保管すると・・・

- 気泡が発生することがある
- インスリンが漏れることがある
- カートリッジ内が汚染されることがある

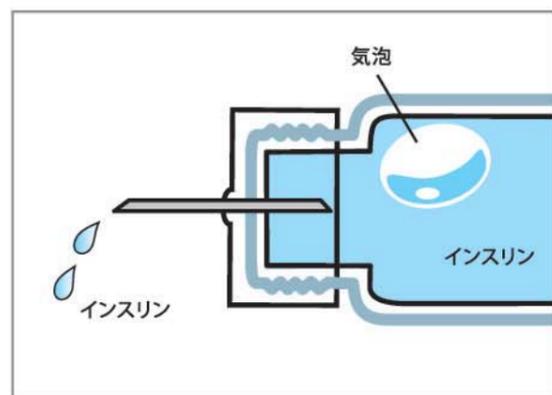


## なぜ？ 同じ注射針を何度も使うと・・・

- 痛みや出血の原因となる
- 注射針のつまりの原因となる
- 感染のおそれがある



使用前の針先の写真

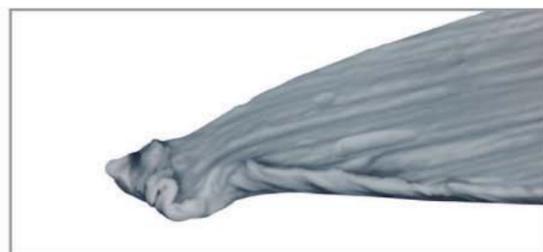

複数回使用の針先の写真

写真提供：日本ベクトン・ディッキンソン社

- ### 解決法
- 注射が終わったら、すぐに注射針をはずして保管する
  - 一度使用した注射針は使わず、毎回新しい注射針を使用する

- ### ポイント
- 針さし事故を起こさないために  
注射針をはずす際には、針キャップは使用せず  
針ケースを使用しましょう

